

HIGROW HSA

ヒト血清アルブミン(HSA)溶液

HiGROWシリーズの培養液に最適な高品質ヒト血清アルブミン溶液
培養液の希釈を軽減できる高濃度20%溶液



製品特徴

- 培養液に添加することにより配偶子処理、媒精、胚培養、胚移植など幅広い用途にご使用いただけます。
- ロットチェックを行い、高品質な原料を選択して製造しています。
- 一般的なHSA溶液より高濃度のため、添加時の培養液の希釈を軽減できます。
- ウイルス安全性テスト(HIV-1/-2、HCV、HBVなど)並びに熱殺菌によるウイルス不活性化処理済みです。



FUSO Pharmaceutical Industries, Ltd.

規格

性状	黄色～黄褐色の澄明な液
pH	6.7～7.3
無菌試験	微生物の増殖を認めない
エンドトキシン試験	1.0EU/mL 未満
マウス胚培養試験	胚盤胞到達率80%以上(1-細胞期胚、4日間培養後)

使用目的・方法

配偶子処理、媒精、胚培養、胚移植等に用いる培養液に、本製品を適切な濃度になるように添加します。
弊社HiGROWシリーズの培養液に添加する際は、0.5%程度の濃度になるよう調製してください。

使用上の注意

- 無菌操作によりご使用ください。
- 濁りなどの異常が認められた場合は、ご使用いただけません。
- 本製品は、医薬品医療機器等法の定めるところの「医薬品」「医療機器」「体外診断用医薬品」ではありません。
また、ヒト、動物の診断あるいは治療に用いるものではありません。
- 本製品はヒト由来の血清成分を含んでいます。原料段階から厳格な品質管理および可能な限りのウイルス不活性化処理が行われておりますが、現時点において感染物質の混入の可能性を完全に否定することはできません。
ご使用の際には適切な感染防止の処置を行ってください。

製品仕様


有効成分 ヒト血清アルブミン

含量 1g

容量 5mL×1本

保存方法 2-8℃(冷蔵)・遮光

使用期限 製造後12ヶ月



充実した
サポート体制

【お問い合わせ】

扶桑薬品工業株式会社 機器診断薬部

E-mail : higrow@fuso-pharm.co.jp

Tel : 06-6969-1131 (平日9:00～17:30)

Fax : 06-6962-0173

製品情報の詳細は弊社Webサイトをご確認ください

<https://www.fuso-pharm.co.jp/>

本社 支店・分室 工場 研究開発センター



製造販売元
扶桑薬品工業株式会社

大阪市城東区森之宮二丁目3番11号