

アイ・スタットアナライザーの取扱いについて

このたび、アイ・スタットアナライザーの取り扱いにつきまして、製造元の Abbott Point of Care Inc. (APOC 社、米国) より、下記のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。

平成22年11月



扶桑薬品工業株式会社

大阪市城東区森之宮二丁目3番11号

記

1. 該当製品 血液分析器

- ①アイ・スタットアナライザー200
- ②アイ・スタットアナライザー300F
- ③アイ・スタット1アナライザー

2. 発生事例

背景

アイ・スタットアナライザーは、2本の使い捨てまたは充電タイプの9Vバッテリーで電源が供給されます。APOC社の調査では、ロットに特定されない一部のアナライザーの電気回路内の構成部品の故障によりバッテリーに発熱が見られたとのことでした。

措置

バッテリーに発熱がみられた場合、使用を中止し、弊社担当者にご連絡ください。

また、発熱直後のバッテリー温度はかなり高くなっていることが想定されますので、アナライザーからバッテリーを外さないようにご注意ください。

なお、これまで国内では同様の事例報告はなく、諸外国においても本件に起因する火傷の報告はありません。

お問い合わせ先

扶桑薬品工業株式会社 営業四課 TEL : 06-6969-1131